

Comment utiliser la sonde VaPro en technique « No Touch »

VaPro

Sondage
Intermittent

Technologie
vaprophile

Mode d'emploi Homme



1- Lavez-vous les mains.



2- Ouvrez l'emballage en tirant sur le fil d'ouverture.




3- Laissez l'emballage sur une surface plane ou collez-le sur un mur.



4- Nettoyez le méat urétral de haut en bas à l'eau et au savon ou avec une lingette humidifiée.




5- Enlevez le capuchon.

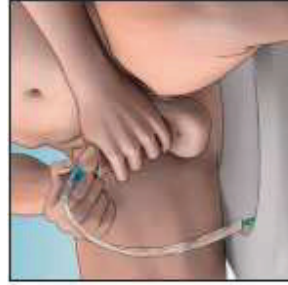

7- Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat. Insérez le guide d'insertion et poussez la sonde.



8- Si vous vous sondez en position debout, dirigez la sonde vers les toilettes ou connectez-la à une poche de recueil.

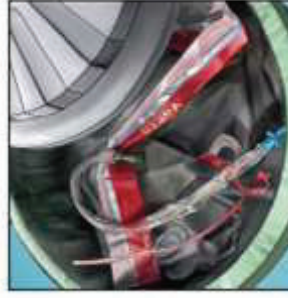

9- Jetez la sonde dans un endroit approprié.



10- Lavez-vous les mains.